


“德盟” Adronic Photoshot

使用手冊 UM-009

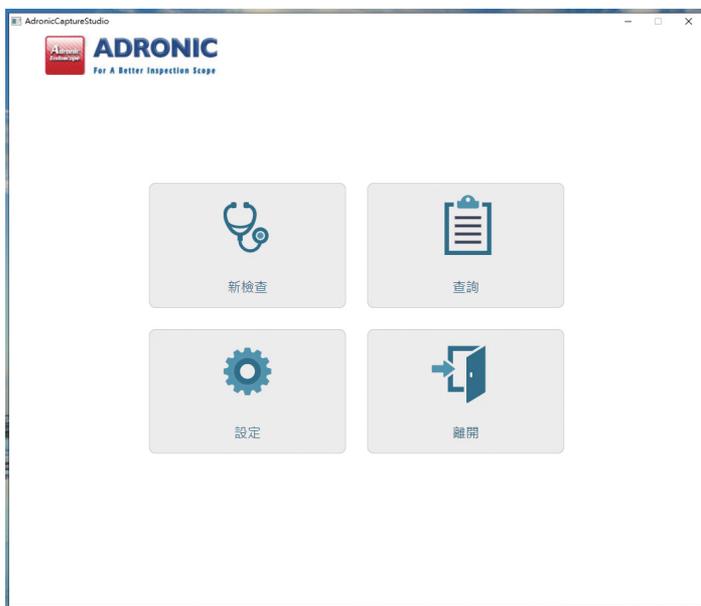

使用前請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用


目錄

1. 系統流程圖	03
2. 使用前準備	04
3. 開啟程式	04
4. 系統主畫面	04
5. 檢查前設定	05
6. 開始新檢查	06
6-1. 病歷資料輸入	06
6-2. 畫面解析度設定	07
6-3. 單張拍照模式	08
6-4. 錄影模式	09
6-5. 二宮格拍照模式	10
6-6. 四宮格拍照模式	11
6-7. 實景畫面形狀切換	12
6-8. 查詢當次檢查影像	12
6-9. 結束當次檢查	13

目錄

7. 病歷資料總覽查詢	-----	13
8. 結束程式	-----	14
9. 故障排除	-----	15
10. 注意事項	-----	15

01. 系統流程圖

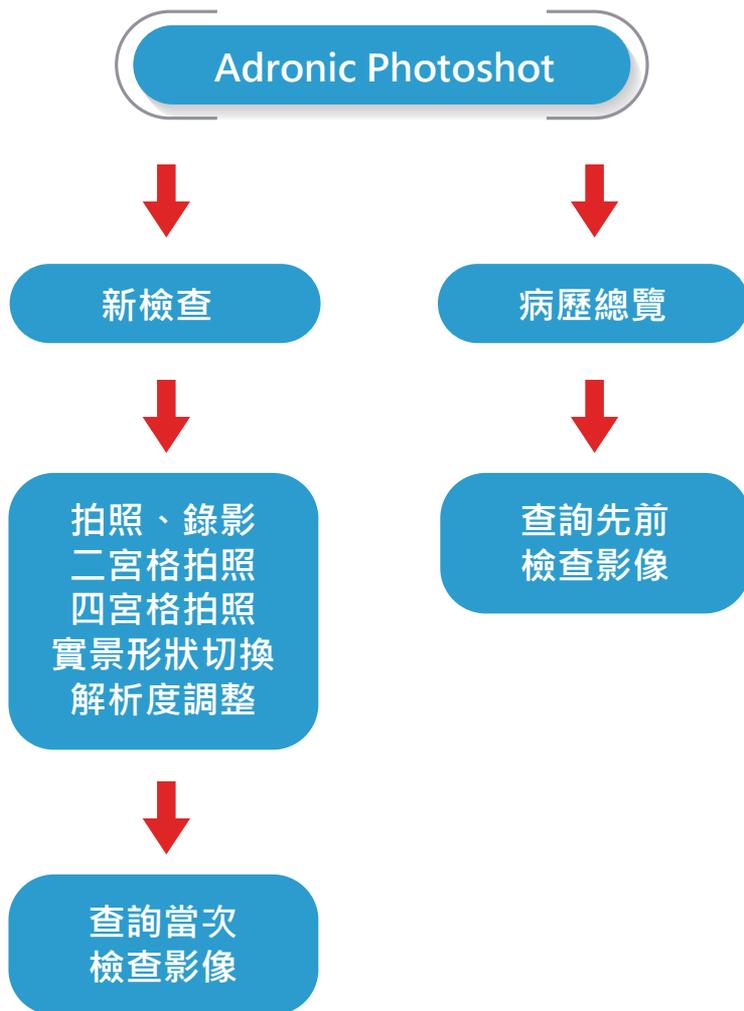

02. 使用前準備

請將內視鏡連接具有Windows 作業系統的桌上型電腦或是筆記型電腦等設備。(可額外選配雙腳踏開關輔助操作使用)



- 雙腳踏開關(選配)

- 尺寸 300 X 162 X 35 mm

03. 開啟程式

雙次點擊執行檔Adronic Photoshot，圖示如下



04. 系統主畫面

啟動頁面如右圖



05. 檢查前設定



1. 啟動頁面點擊左下方設定方塊



2. 點擊裝置選取欄位灰色格，
下拉選取想使用的內視鏡裝置。



3. 點擊儲存方塊完成設定，右上方
會出現設定成功提示訊息並自動
回到啟動頁面。

06. 開始新檢查

6-1. 病歷資料輸入



1.1 啟動頁面點擊左上方新檢查方塊



1.2 輸入新病歷資料



1.3 輸入完畢，點擊開始檢查方塊
進入實景檢查畫面。

6-2. 畫面解析度設定



2.1 點擊左側工具列解析度圖示，顯示解析度調整欄位。




2.2 點擊灰色格，展開解析度清單並選取想要的解析度。



2.3 點擊設定方塊完成變更並自動回到實景檢查畫面。

6-3. 單張拍照模式

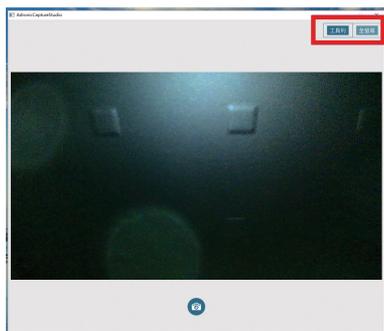

3.1 點擊畫面右上角全螢幕可隱藏工具列簡化畫面方便檢查。

點擊實景畫面內的拍照圖示(亦可點擊鍵盤快捷鍵F9 或腳踏開關左鍵)。



3.2 畫面會稍作停頓且右上方會顯示影像存檔成功提示訊息並自動回到實景畫面。

6-4. 錄影模式



- 4.1 點擊左側工具列錄影圖示
(亦可點擊鍵盤快捷鍵F10 或
單次點擊腳踏開關右鍵)。



- 4.2 實景畫面左上方出現紅色錄影圖示
及顯示秒數，錄影期間可點擊實景
畫面內的拍照圖示(亦可點擊鍵盤快
捷鍵F9 或腳踏開關左鍵)
邊錄影邊進行拍照。



- 4.3 再次點擊錄影圖示(亦可點擊鍵盤
快捷鍵F10 或單次點擊腳踏開關
右鍵)即可結束錄影，右上方會顯
示影片存檔成功提示訊息並自動
回到實景畫面。

6-5. 二宮格拍照模式



5.1 點擊左側工具列二宮格拍照圖示。



5.2 實景畫面會顯示左半格畫面，
點擊拍照圖示(亦可點擊鍵盤快捷
鍵F9 或腳踏開關左鍵)進行拍照。



5.3 實景畫面顯示右半格畫面，點擊
拍照圖示(亦可點擊鍵盤快捷鍵
F9 或腳踏開關左鍵)進行拍照。



5.4 完成拍照後，畫面會停止且右上方
會顯示影像存檔成功，按下鍵盤任
意鍵返回實景畫面。

6-6. 四宮格拍照模式



6.1 點擊左側工具列四宮格拍照圖示。



6.2 實景畫面會顯示左上格畫面，點擊拍照圖示(亦可點擊鍵盤快捷鍵F9或腳踏開關左鍵)進行拍照。



6.3 依序點擊每格畫面拍照圖示進行拍照。

6.4 完成拍照後，畫面會停止且右上方會顯示影像存檔成功，按下鍵盤任意鍵返回實景畫面。

6-7. 實景畫面形狀切換



7.1 點擊左側工具列形狀切換圖示，實景畫面四周會被遮蔽只留中間圓形範圍以利觀察。



7.2 再次點擊形狀切換圖示即可返回到方形觀察畫面。

6-8. 查詢當次檢查影像



8.1 點擊左下方查詢圖示，進入當次檢查資料瀏覽畫面。



8.2 進入小圖瀏覽模式，可對照片或影片進行多張同步刪除，再次點擊想觀看的照片或影片進行觀看。

6-9. 結束當次檢查

點擊左下方離開圖示，回到啟動頁面。




8.3 點擊畫面左右兩側箭號可切換同次檢查其他照片或影片，按下返回方塊即可回到小圖瀏覽模式。

8.4 小圖瀏覽模式點擊右下方返回方塊，回到檢查畫面繼續進行檢查。

07. 病歷資料總覽查詢



1. 點擊啟動頁面右上方查詢方塊，進入病歷資料清單。

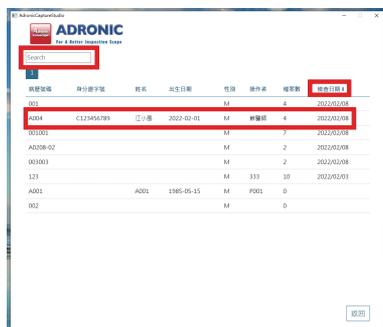

2. 每分頁可顯示15筆病歷資料，超過15筆資料時可點擊左上方分頁數字切換顯示頁面。可依照不同欄位需求升序或降序重新排列。左上方查詢欄提供快速檢索功能，輸入部份資料即可快速查詢並顯示相關病歷資料。點擊清單中想觀看的病歷資料。



3. 進入小圖瀏覽模式，可對照片或影片進行多張同步刪除，再次點擊想觀看的照片或影片進行觀看。



4. 點擊畫面左右兩側箭號可切換同次檢查其他照片或影片，按下返回方塊即可回到小圖瀏覽模式。
5. 小圖瀏覽模式點擊右下方返回方塊回到病歷資料清單。
6. 病歷資料清單點擊右下方返回方塊，結束查詢並回到啟動頁面。

08. 結束程式



點擊啟動頁面右下方離開方塊，結束並自動關閉視窗。

09. 故障排除

1. Q：多次點擊執行檔沒有反應？
A：請將主機重開機，再次點擊執行檔即可開啟程式。
2. Q：設定頁面裝置選取欄位未顯示已連接的內視鏡？
A：請將內視鏡裝置移除並重新插入主機插槽，回到啟動頁面後再次進入設定頁面即可顯示裝置。
3. Q：進入實景檢查時發現畫面黑屏？
A：請先確認內視鏡接頭與主機插槽是否有正常連接或是異常脫落，重新連接並再次啟動程式後，至設定頁面檢視裝置選取是否有顯示目前使用的內視鏡。
4. 若上述方式皆無法解決問題，請與供應商聯繫反應。

10. 注意事項

1. 建議使用時搭配符合醫療級電性安全、電磁相容性規範等的相關設備，以避免使用時出現訊號干擾等現象。
2. 使用者需具備基本Windows 作業系統操作，以及硬體設備連接方式確認的能力。
3. 程式及使用手冊僅供給已被授權的使用者去使用，未經本公司授權或同意，請勿做任意修改和使用。
4. 程式主要提供影像輔助資訊，不能代替醫療專業人員進行診斷判定。